



VELTOP COSY 2 & COSY PLUS 2


GEBRAUCHS-UND MONTAGE ANWEISUNG BEFESTIGUNG AM HORIZONTALEN ROHR

NOTICE DE MONTAGE FIXATION SUR TUBE HORIZONTAL

INSTRUCTIONS OF INSTALLING FIXATION ON THE HORIZONTAL TUBE

1

Montagewahl mit 1 oder 2 Paar
Montage possible avec 1 ou 2 paires
Possible Mounting with 1 or 2 pairs

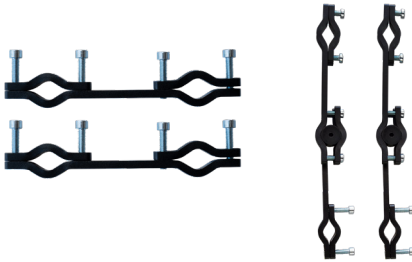

Ref. ADATHCOSY



2

Rohr Positionierung so nah wie möglich vom Sitz
Positionner le tube le plus proche possible du siège
Tube position as close as possible from the seat



Ref. TUBCOSY2



3



Ref. CAPCOSY2





Ref. PAV-COSY2
 Weiches PVC Frontschutz
 Partie avant PVC souple
 Soft PVC front protection



Polycarbonate Frontschutz
 Partie avant en polycarbonate
 Polycarbonate front protection

Ref. PAV-PC-COSY2



Höheneinstellung des verdeckts

Réglage hauteur protection

Canopy height adjustment


1X 12cm (4,7)

12 X 24 cm (4,7 to 9,4in)




Ref. PJ-COSY2

Beinschutz höhenverstellbar
 Protection jambes ajustable en hauteur
 Leg protection height adjustment

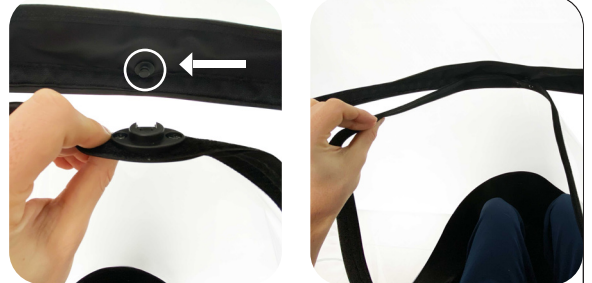

Befestigen Sie den Beinschutz mit dem Klettband
 Fixer la protection jambes avec l'aide du VELCRO
 Fix the leg protection thanks to the VELCRO

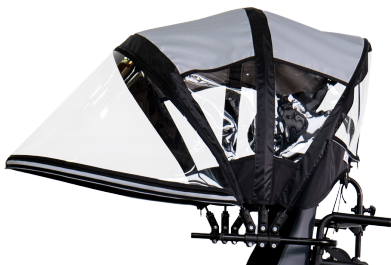

100% Polyester



Ref: VELCOSYPLUS2-TH
 N° NOTCOSY2-TH



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
 74320 SEVRIER

FRANCE

T: 0033(0) 4 50 77 56 17

F: 0033(0) 4 50 63 45 36

info@veltop.com

www.veltop.eu